



# Hallo!

Vielen Dank für deine Bestellung unseres **Test-Sets auf Salmonellen**.

### Mit diesem Set bekommst du:

- Diese Anleitung zur Probenentnahme und Abwicklung
- Das Auftragsformular
- Das Probenentnahme-Kit mit Beutel A und B
- Einen Karton für die Rücksendung mit 2 Paketscheinen: DHL und DPD (EU-Versand)

### So gehts nun weiter:

Um die Proben zu entnehmen achte auf Hygiene!  
Am besten ziehst du vorweg Einweg-Überziehschuhe und -Handschuhe an.  
Dies ist für Geflügelbetriebe sogar vorgeschrieben!



- Fülle das Formular aus
- Gehe in den Stall
- Ziehe dort die ersten beiden Swab-Boots aus Beutel B an
- Gehe damit bis zum Ende des Stalls, um mit den angefeuchteten Schuhe die Proben aufzunehmen
- Ziehe nun das zweite Paar Swab-Boots an und laufe zurück
- Packe die Swab-Boots wieder in den Beutel B
- Verschließe und beschrifte ihn
- Packe den Beutel B mit den Swab-Boots zusammen mit dem ausgefüllten Auftragsformular in den mitgelieferten Karton und verschließe ihn
- Bringe das Päckchen zur Post.

Innerhalb von 5 -7 Arbeitstagen bekommst du den Befund per Mail zugeschickt. Wenn du zum Befund einen tierärztlichen Rat einholen möchtest, kannst du dies z.B. in der Online-Sprechstunde von Dr. Eva-Maria Casteel. Sie ist Geflügeltierärztin, selbst Hühnerbesitzerin und arbeitet seit mehr als 10 Jahren in der Geflügelmedizin. Sie gibt dir Einschätzungen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen.